

نکات استفاده روزانه

همیشه با جوراب نرم و بدون درز کفش را بپوشید.

قبل از هر موقع پوشیدن کفش، داخل کفش را از نظر سنگ ریزه یا ناصافی بررسی کنید.

در صورت قرمزی یا تاول، بلافاصله استفاده را متوقف کرده و با پزشک مشورت کنید.

هر ۶-۱۲ ماه یا بیشتر (بسته به استفاده) کفی کفش را ارزیابی و اگر کفی آن فرسوده شده، جایگزین شود.

هر بار که کفی کفش را عوض می کنید، نسبت به فیت بودن کفش ها اطمینان حاصل شود. اجازه بدهید کفش ها در معرض هوا قرار بگیرد.

نکته مهم: از راه رفتن بدون کفش، یا پوشیدن کفش بسیار تنگ یا گشاد، خودداری شود.

مراقبت از پا در منزل

پاها را هر روز با آب ولرم و صابون ملایم بشوید و خشک کنید بین انگشتان را خشک نگه دارید.

ناخن ها را به شکل صاف کوتاه کنید. از بریدن پینه ها یا پوست خشک خودداری کنید.

پیشنهاد نگهداری کفش

پس از هر استفاده، کفش را خشک و تمیز نگه دارید. از قرار دادن کفش در معرض آفتاب مستقیم خودداری کنید

هر ۶ تا ۱۲ ماه کفش را بررسی یا تعویض کنید. کفش را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید.

بطور مرتب با استفاده از واکس های گیاهی، واکس بزنید.

ویژگی های کفش دیابتی معراج طب و فواید آنها برای افراد دیابتی

اولین و تنها ترین کفش دیابتی در ایران با معیار های پزشکی تایید شده و الزامات سازمان بهداشت جهانی

چرا کفش دیابتی معراج طب تبریز بهترین انتخاب برای پای

دیابتی است ؟

کفش دیابتی معراج طب تبریز کفشی است که با اتکا به تحقیقات دانشگاهی و علم پزشکی فناوری روز و عشق به سلامت طراحی شده است.



ویژگی های زیر کفش دیابتی معراج طب تبریز را از سایر کفش ها متمایز می کند :

۱- استفاده از چرم فرآوری شده با مواد گیاهی


پایپوش نباید بر سلامت و بهداشت کاربر تاثیر منفی بگذارد. به همین دلیل باید مواد به کار رفته در نوع جنس استفاده شده عاری از هرگونه مواد سمی، سرطان زا و آلرژی باشد و همچنین مقاوم در برابر آب و دوام در برابر سایش و توانایی خط فرم کفش را دارا باشد و از التهاب تحریک، عفونت های قارچی و خارش پوست حساس پای دیابتی جلوگیری کند چون چرم قادر به ارائه حفاظت و حمایت کافی از پای بیمار است.

۲- آزادی انگشتان پا و فضای مناسب

پنجه پهن و مطابق با فرم طبیعی پا باعث ایجاد فضای مناسب و جلوگیری از فشار روی انگشتان می شود و برای پاهای دارای تغییر شکل مناسب می باشد. یعنی در نوع کفش دیابتی، هیچگونه نباید تماسی بین انگشتان پا باهمدیگر داشته و کاملا باید آزاد باشند که این امر کاملا در کفش دیابتی معراج طب تبریز رعایت شده است.

۳- جلوگیری از اصطکاک پا

از آنجائی که بیماران دیابتی فاقد حس های محافظت کننده خود می باشند و پا هم باید کاملا در خود کفش فیت و محکم باشد که یکی از ارکان های مهم کفش دیابتی است، باید بست های قابل تنظیم یا بند یا برچسب را کفش دارا باشد که بتواند کاملا پا را بپوشاند و از حرکات اضافی پا داخل کفش جلوگیری کند محکم بسته شود و اصلا نباید بزرگ یا کوچک باشد.

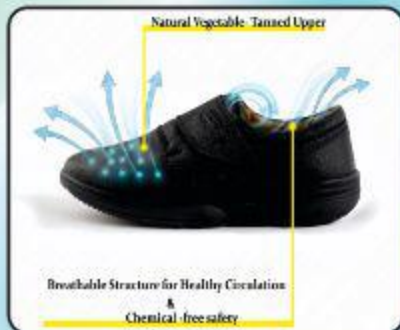

۴- استفاده از زیره گهواره ای با توزیع فشار هوشمند


یکی از عوامل مهم دارا بودن کفش دیابتی، همین گهواره ای بودن زیره خاص این نوع کفش ها می باشد که برای کمک به باز کردن انگشتان پا و جلوگیری از اصطکاک و توزیع یکساخت وزن بدن و همچنین کمک به راه رفتن طبیعی مفید می باشد و همه این اوامر به خوبی در کفش های دیابتی معراج طب تبریز رعایت شده است.

۵- طراحی و مشخصات زیره کفش

یکی از موارد مهمی که زیره کفش دیابتی علاوه بر جنس مواد که بهتر است از پلی یورتان باشد و وزن آن سبک و با دوام، ضخامت و شکل خشن آج زیره هست ضخامت زیره باید طوری باشد که فرد دیابتی هنگام استفاده از آن (کفش) هیچ گونه اشیایی راهنگام راه رفتن در زیر پای خود حس نکند و شکل آج زیره هم باید خشن باشد تا بیشتر با کف زمین در تماس باشد و سر نخورد چون تعادل یکی از عوامل مهم برای فرد دیابتی می باشد.

۶- دو نوع کفی طراحی شده برای فیت کردن پا و جنس مربوطه

علاوه بر اینکه جنس مواد بهتر است از پلی یورتان سرد باشد به خاطر انعطاف پذیری بیشتر و سبک بودن آن و دیر از دست دادن حفظ شکل ظاهری که خیلی خیلی مهم است برای اینکه شکل کفی به هیچ عنوان نباید تغییر پیدا کند چون در غیر این صورت فضای اضافی بین کفش و پا ایجاد میشود و باعث اصطکاک پذیری بیشتر و فیت نبودن کفش می شود و عارضه پا را شدید تر میکند در حالی که هدف آرام تر کردن و کاهش دادن بیماری مربوطه است، دو نوع کفی از لحاظ ارتفاع برای کفش دیابتی معراج طب تبریز طبق استانداردهای جهانی طراحی و در بسته بندی مربوطه عرضه شده است.

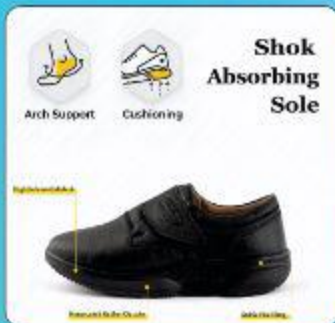



معراج طب تبریز

اولین تولید کننده کفش دیابتی در ایران مطابق با الزامات بهداشت جهانی

دارای تاییدیه علمی از انجمن دیابت

مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی



www.merajtebtabrizzdiabetic.com



www.merajtebtabrizzdiabetic.com

۷- عمق اضافی داخل کفش

کفش دیابتی باید دارای یک پرکننده تمام طول پاشنه تا پنجه باشد به این دلیل این عمق اضافی تعبیه شده در کفش های دیابتی معراج طب تبریز برای قراردادن اینزرت های اختصاصی ایجاد شده است که یک کفش استاندارد معمولی همچنین خصوصیتی را دارا نمی باشد و نمی تواند اینزرت محافظتی اختصاصی را در خود جای دهد.

۸- کفش دیابتی طراحی شده برای هر سایز مربوطه با پنجه پهن - متوسط و ظریف

در صورتی که سایز بندی کفش ها با نیم سایز بودن هر سایز طراحی شده است، برای هر سایز مربوطه هم سه نوع فرم شکل دهی نامبرده جهت راحتی و فیت بودن پا از لحاظ پنجه پا در نظر گرفته شده تا فرد بیمار مربوطه بتواند بهترین نوع کفش فرم پای خود را خریداری کند.

۹- دارای تاییدیه انجمن دیابت تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

با پشتیبانی علمی و تحقیقات دانشگاهی

بر اساس تحقیقات مرکز تحقیقات چرم و کفش دانشگاه آزاد تبریز و تست های بالینی صورت گرفته توسط انجمن دیابت تبریز، کفش دیابتی معراج طب تبریز بر اساس الزامات سازمان بهداشت جهانی تهیه شده و از سلامت محور بودن طراحی و کیفیت تایید شده علمی آن اطمینان حاصل شده است و افراد دیابتی می توانند با انتخاب کفش دیابتی معراج طب تبریز با خیال راحت از یک کفش استاندارد، تخصص و معتبر استفاده نمایند.